

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАНТОМ

Краткое описание частей	Данная инструкция относится к двум моделям: JG-C6-1 зажимного типа, JG-C6-3 с фиксированным подголовником
	Типодонт: 28 или 32 зуба, мягкая десна с артикулятором FE.
	Металлический шарнир (на JG-C6-1). Студент может регулировать положение головы.
	Силиконовая маска лица с дренажной трубкой, симуляция стом. процедуры.
	Другие аксессуары: пластиковая поверхность головы, винты, ключ.
Монтаж	Установка артикулятора и поверхности головы: 1. Вставьте ось, которая используется для фиксации установки, в артикулятор; 2. Острая сторона оси должна быть направлена вовнутрь артикулятора, затяните рукоятку до надёжной фиксации. 3. Установите верхнечелюстную пластину прямо в паз на поверхности головы, до щелчка. Сборка силиконовой маски и стоматологической модели. 1. Открутите винты сзади стом. модели, опустите артикулятор; 2. Растяните силиконовую маску лица рукой, вставьте в неё модели верхней и нижней челюстей, расположите их в правильном направлении; 3. Закрутите 4 винта сзади модели челюсти и зафиксируйте силиконовую маску. Сборка стоматологической модели и артикулятора. 1. Открутите 2 винта на артикуляторе, максимально вытяните нижнюю челюсть вперёд; 2. Вставьте винт, расположенный на артикуляторе, в резьбовое отверстие на стом. модели, закрутите его, затем

	закрепите модель. Закрепите фантом на учебном столе (только для модели: JG-C6-1, на JG-C6-3 манекен просто нужно скрепить с подголовником с помощью болта) 1. Ослабьте крестообразную рукоятку; 2. Максимально плотно установите край стола в захватный держатель. 3. Затяните крестообразную рукоятку.
Особенности	Данный фантом типа I очень прост, но широко применяется на рабочих местах и в домах студентами, стажёрами амбулаторного обслуживания, ассистентами стоматолога. Он соответствует всем аспектам стоматологического обучения.
Рекомендуемые функции	Подготовка, снятие слепков и т.д.