


LINDAR

МОЙКА-ДЕЗИНФЕКТОР

Thermal-Film Technology

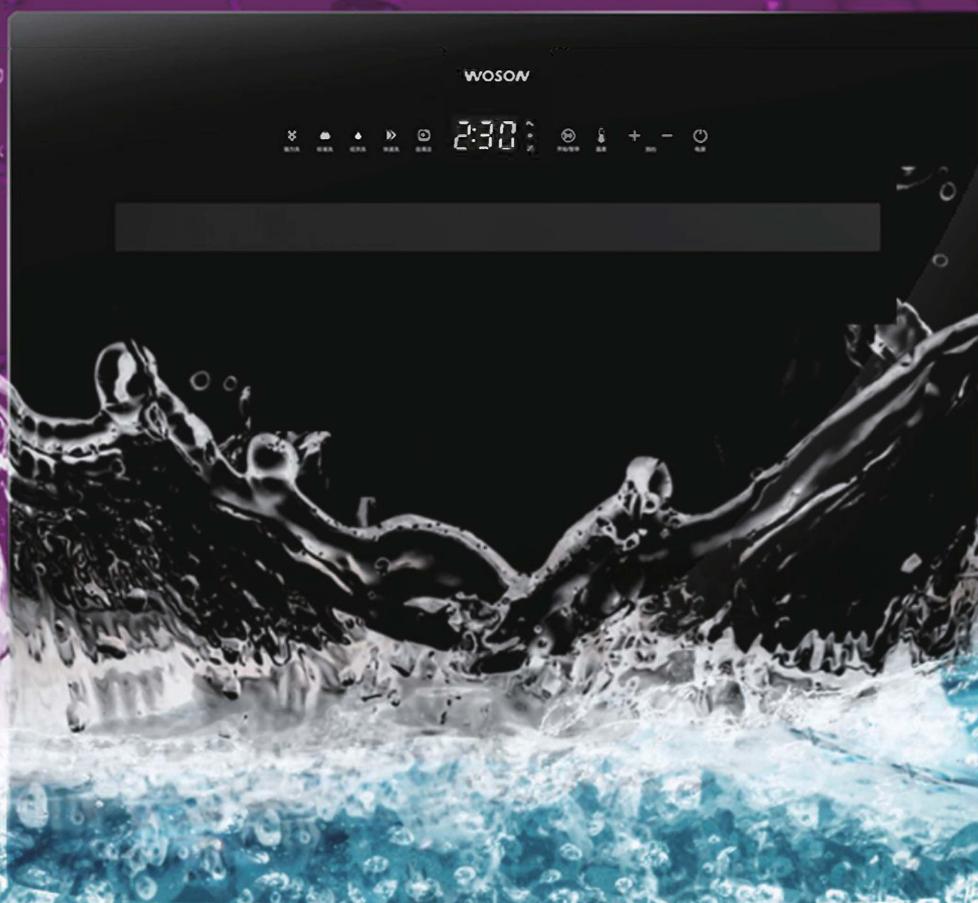

Выбор стоматологических клиник МОЙКА-ДЕЗИНФЕКТОР LINDAR



- 1.** Моет полностью автоматически, проста в эксплуатации, энергосберегающая и экологичная.
- 2.** Супер-емкость, можно мыть разнообразные инструменты одновременно.
- 3.** 5 умных программ мойки, отвечает разнообразным требованиям.
- 4.** Технология двойной сушки с помощью термопленки



TANVO Li & LINDAR

45L Super Capacity

100L Cleaning Capacity



B-CLASS



5 Level Chamber



100% Sterilization



Sensitive Control

LINDAR

Медицинская моечная машина WOSON LINDAR используется для мытья медицинских инструментов под управлением микрокомпьютера. В основе действие циркуляционного водяного насоса высокого давления, динамическое разбрызгивание в нескольких направлениях достигается с помощью коромысла-распылителя. Заключительный процесс мытья представляет собой термальную мойку при высокой температуре 93°C: на 23°C выше, чем у обычных медицинских моек, одновременно с поливом стоматологических инструментов сильной струей воды.

При запуске процедуры мытья и добавлении низкопенного полиферментного моющего средства, она быстро расщепляет и удаляет загрязняющие вещества с внешней поверхности и из внутренних полостей стоматологических инструментов так чтобы достичь эффекта полного очищения стоматологических наконечников внутри и снаружи.

Лучший партнер.

TANVO Li и LINDAR

Супер-емкость 45 л

Автоматический электронный замок на двери

Водяной циркуляционный насос

Двойной парогенератор

Переносная камера (опционально)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: время работы основано на температуре воды 25 градусов С, время увеличивается или сокращается с помощью температуры подачи воды.

ВНИМАНИЕ: все инструменты, подвергаемые машинной мойке, (например, наконечники) после мытья следует стерилизовать.

Программа	Тяжелая	Стандартная	Экономичная	Быстрая	Самоочистка
Моющее средство	30 мл	25 мл	20 мл	15 мл	-
Время программы	105 минут	75 минут	60 минут	30 минут	20 минут
Температура мытья	93°C	90°C	80°C	45°C	45°C
Время мытья при высокой температуре	3 минуты	5.5 минут	10.5 минут	N/A	N/A
Рассеивание энергии	1.7 кВт	1.5 кВт	1.2 кВт	0.7 кВт	0.5 кВт
Потребление воды	13 л	11 л	8 л	8 л	6 л

Модель	LINDAR
Электропитание	220 В 50/60 Гц
Давление воды на впуске	0.04 - 1.00 МПа
Температура воды на впуске	5°C – 40°C
Давление воды внутри	0.2-0.25 МПа
Емкость	100 л
Габариты изделия	595 x 550 x 620 (мм длина x ширина x высота)
Размер упаковки	700 x 615 x 725 (длина x ширина x высота мм)
Масса нетто	38 кг
Шум	60 дБ

WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

No.25, Lane 300, Jinshan Road, Jiangbei District,
Ningbo 315032, China

Tel:86-574-83022668 Fax: 86-574-87639376
www.wosongroup.com overseas@woson.com.cn

WOSON
Infection control
equipments